

Ersatzteilkatalog Schweiz

Tango



Inhaltsverzeichnis

ango	5
Antriebsrad / Lenkrad	6
Antriebsrad 12 Zoll	7
Antriebsrad 14 Zoll	8
Lenkrad 8 Zoll	9
Lenkrad 9 Zoll	11
Fußraste	13
Fußbrett (ab 05.03.2013, Serien-Nr.: TAN13027481)	14
Fußraste elektrisch hochschwenkbar (ELR), bis 02.07.2013 (Serien-Nr.: TAN13068283)	15
Fußraste elektrisch hochschwenkbar (ELR), ab 02.07.2013 (Serien-Nr.: TAN13068284)	16
Fußraste hochschwenkbar (ELR) ab KW33/2012	17
Fußraste hochschwenkbar (ELR) bis KW32/2012	18
Fußrastenhalter 70°, ab 05.02.2013 (Serien-Nr. TAN13027481)	19
Fußraste, 70°, mit Fußbrett, Aluminium	20
Fußraste hochschwenkbar, UNI Style	21
Fußbrett für Fußraste hochschwenkbar, UNI Style	22
Kabelbäume	23
Batterie Kabel	24
Kabel Verstellmotor	25
Licht / Blinker	26
Licht / Blinker	27
Motor	28
Motor	29

Seite 2 / 71 02.06.2020



Inhaltsverzeichnis

Produktaufkleber	31
Produktaufkleber	32
Rahmen	33
Abdeckungen	34
Batterietisch	35
Federung	36
Motor Anbindung und Sicherheitsrad	37
Rahmen	38
Sitz / Rücken	40
Beckengurt	41
Komfort Rücken	42
Rücken/Rückenverstellung	43
Rückenbespannung Standard	45
Seitenteil	46
Sitzhöhen Kit	47
Sitzkissen	48
Sitzneigung, elektrisch	49
Sitzneigung, fest	50
Sitzneigung, manuell	51
Sitzrahmen	52
Seitenteilaufnahme	53
Seitenteil, klein	54
Seitenpolster, Sitzbreitenreduktion	55
Steuerung	56

Seite 3 / 71 02.06.2020



Inhaltsverzeichnis

Halter Ansteuerungsbox 4 Verstellmotoren	57
Halter Dualsteuerung	58
Halter parallel abschwenkbar	59
Steuerung	60
Zubehör	62
Batterien und Ladegerät	63
Bürgersteighilfe	65
Komfort Kopfstütze	66
Rückspiegel	67
	60
Standard Kopfstütze	68
Stockhalter	69
Stockilaitei	69
Therapietisch	70
Therapiedaen	70

Seite 4 / 71 02.06.2020



Tango

Ersatzteile

Bezeichnung
Antriebsrad / Lenkrad
Fußraste
Kabelbäume
Licht / Blinker
Motor
Produktaufkleber
Rahmen
Sitz / Rücken
Steuerung
Zubehör

Seite 5 / 71 02.06.2020




Antriebsrad / Lenkrad

Ersatzteile

Bezeichnung		
Antriebsrad 12 Zoll		
Antriebsrad 14 Zoll		
Lenkrad 8 Zoll		
Lenkrad 9 Zoll		

Seite 6 / 71 02.06.2020




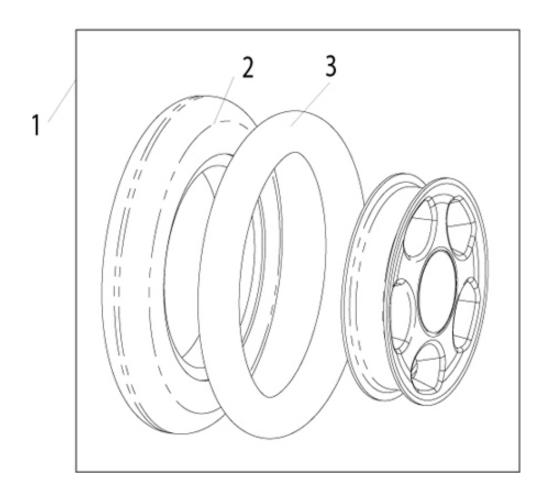

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
3	000698.0301	Schlauch 12,5 Zoll x 2,25 Zoll, TR13	
2	000703.0300	Reifen 12,5 Zoll, Luft, Beschriftung auf Reifen: 12 1/2 X 2 1/4 (57-203)	
	015664-01	Not-Freilauf 12,5 Zoll, Vollgummi, Beschriftung auf Reifen: 12 1/2 X 2 1/4,für Motor Nr. 107243 - 107246 (ohne Distanz # 060174)	nur in UK erhältlich
2	015712	Reifen 12,5 Zoll, Vollgummi, Beschriftung auf Reifen: 12 1/2 X 2 1/4 (57-203)	
1	C06132	Antriebsrad Luft 12 Zoll mit Motornabe kpl.	
1	C06226	Antriebsrad Vollgummi 12 Zoll mit Motornabe kpl.	

Seite 7 / 71 02.06.2020




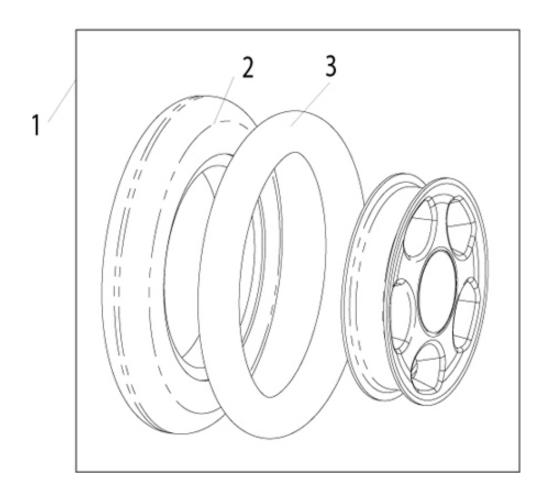

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
2	014026	Reifen 14 Zoll, V-Type, Luft, Beschriftung auf Reifen: 3.00-8, grau	
2	015453	Reifen 14 Zoll, V-Type, Vollgummi, Beschriftung auf Reifen: 3.00-8, grau	
2	384709	Reifen 14 Zoll, Luft, Beschriftung auf Reifen: 3.00-8, grau	
3	384739	Schlauch 14 Zoll	
1	C06261	Antriebsrad Luft 14 Zoll mit Motornabe kpl.	Rechts
1	C06262	Antriebsrad Luft 14 Zoll mit Motornabe kpl.	Links
1	C06263	Antriebsrad Vollgummi 14 Zoll mit Motornabe kpl.	Rechts
1	C06264	Antriebsrad Vollgummi 14 Zoll mit Motornabe kpl.	Links

Seite 8 / 71 02.06.2020



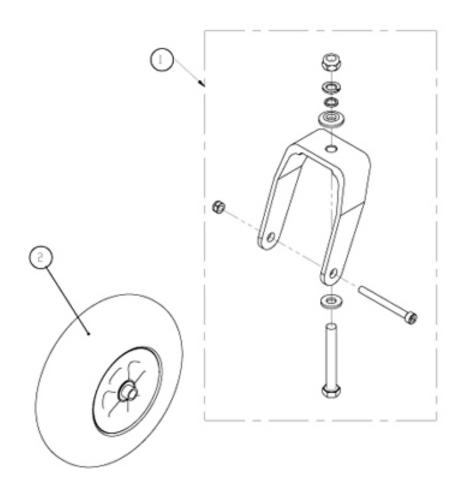

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	C04172	Lenkradgabel 8 Zoll, kpl.	Hinweis: für Rollstühle gebaut ab 14.10.2014.
1 - 2	C04233	Lenkrad 8 Zoll (inkl. Gabel), kpl.	Hinweis: für Rollstühle gebaut ab 14.10.2014.
1 - 4	C06249	Lenkrad 8 Zoll (inkl. Gabel), kpl.	Hinweis: für Rollstühle gebaut vor Seriennummer TAN14101720 (13.10.2014).
2	C06286	Lenkrad 8 Zoll	
1	C06761	Lenkradgabel 8 Zoll, kpl.	Hinweis: für Rollstühle

Seite 9 / 71 02.06.2020




Lenkrad 8 Zoll

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
			gebaut vor Seriennummer TAN14101720 (13.10.2014). Wir empfehlen den Austausch beider Lenkradgabeln
3	P04006	Mutter M8 DIN985	
4	P04205	Schraube M8X80	1 St./Pkg.

Seite 10 / 71 02.06.2020



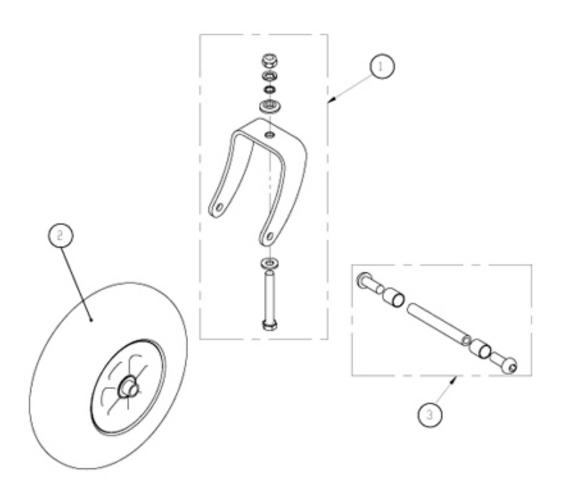

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	C04173	Lenkradgabel 9 Zoll, kpl.	Hinweis: für Rollstühle gebaut ab 14.10.2014.
1 - 3	C04236	Lenkrad 9 Zoll (inkl. Gabel), kpl.	1 St./Pkg., Hinweis: für Rollstühle gebaut ab 14.10.2014.
1 - 3	C06224	Lenkrad 9 Zoll (inkl. Gabel), kpl.	Hinweis: für Rollstühle gebaut vor Seriennummer TAN14101720 (13.10.2014).
2	C06756	Lenkrad 9 Zoll, Vollgummi	
3	C06758	Lenkradachse (für 9 Zoll Lenkrad)	

Seite 11 / 71 02.06.2020



Lenkrad 9 Zoll

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	C06762	Lenkradgabel 9 Zoll, kpl.	Hinweis: für Rollstühle gebaut vor Seriennummer TAN14101720 (13.10.2014). Wir empfehlen den Austausch beider Lenkradgabeln

Seite 12 / 71 02.06.2020



Fußraste

Ersatzteile

Bezeichnung

Fußbrett (ab 05.03.2013, Serien-Nr.: TAN13027481)

Fußraste elektrisch hochschwenkbar (ELR), bis 02.07.2013 (Serien-Nr.: TAN13068283)

Fußraste elektrisch hochschwenkbar (ELR), ab 02.07.2013 (Serien-Nr.: TAN13068284)

Fußraste hochschwenkbar (ELR) ab KW33/2012

Fußraste hochschwenkbar (ELR) bis KW32/2012

Fußrastenhalter 70°, ab 05.02.2013 (Serien-Nr. TAN13027481)

Metall Fußraste 70°

Fußbrett für Fußraste 70°

Fußraste, 70°, mit Fußbrett, Aluminium

Fußraste, 80° mit Fußbrett UNI Style

Fußraste hochschwenkbar, UNI Style


Fußbrett für Fußraste hochschwenkbar, UNI Style

Fußraste kurz, mit Fußbrett, links

Fußraste kurz, mit Fußbrett, rechts

Seite 13 / 71 02.06.2020



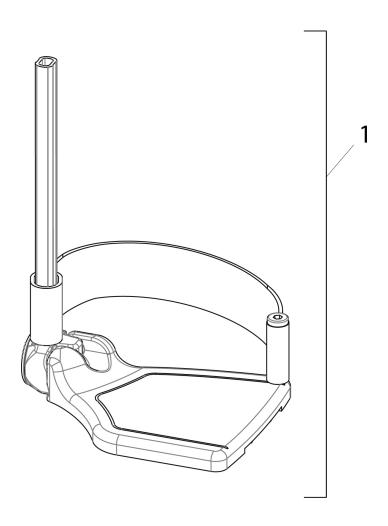


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	034214-000	Fußbrett, Kunststoff ab SB 400 mm	Paar
1	034214-001	Fußbrett, Kunststoff ab SB 400 mm	rechts
1	034214-002	Fußbrett, Kunststoff ab SB 400 mm	links

Seite 14 / 71 02.06.2020



Fußraste elektrisch hochschwenkbar (ELR), bis 02.07.2013 (Serien-Nr.: TAN13068283)

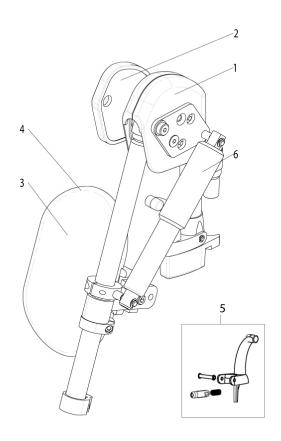


Ersatzteile

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
6	034199	Verstellmotor mit Befestigungen	
2	064250-001	Kniepolster	rechts
	064250-002	Kniepolster	links
3 - 4	064924	Wadenauflage mit Überzug	
4	064927	Überzug für Wadenpolster	
5	064999-ET	Auslösehebel	10 St./Pkg.

Seite 15 / 71 02.06.2020



Fußraste elektrisch hochschwenkbar (ELR), ab 02.07.2013 (Serien-Nr.: TAN13068284)

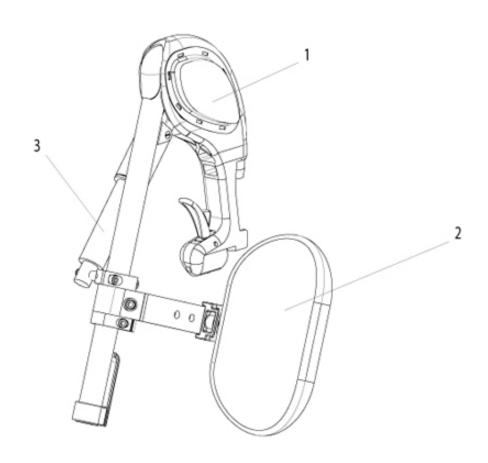


Ersatzteile

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	034215-000	Fußraste, elektrisch hochschwenkbar	Paar
1 - 3	034215-001	Fußraste, elektrisch hochschwenkbar	rechts
	034215-002	Fußraste, elektrisch hochschwenkbar	links
1	064766-000-ET	Kniepolster	Paar
2	064924	Wadenauflage mit Überzug	

Seite 16 / 71 02.06.2020




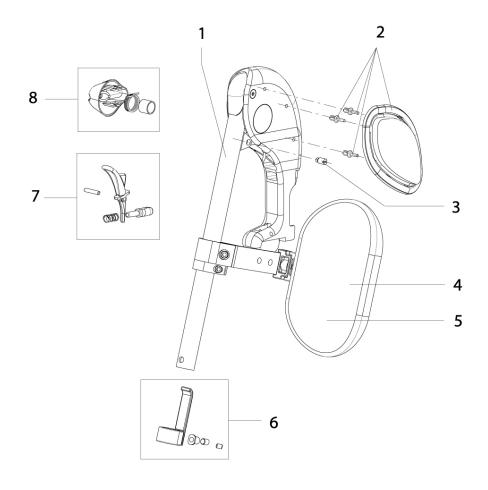

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
2	064766-000-ET		
2	004700-000-E1	Kniepolster	Paar
	064840-001	ELR-Fußraste mit Std-Wadenpolster (ohne Fußbrett)	links
1-8	064840-002	ELR-Fußraste mit Std-Wadenpolster (ohne Fußbrett)	rechts
3	064855-ET	Madenschraube	10 St./Pkg.
4-5	064924	Wadenauflage mit Überzug	
4	064927	Überzug für Wadenpolster	
	06802008-001	Klemmschutz, ELR	10 St./Pkg.
7	069940	Auslösehebel	
8	069941	Auslösemechanismus	
6	069942	Klemme für Fußraste inkl. Befestigungsmaterial	Paar

Seite 17 / 71 02.06.2020




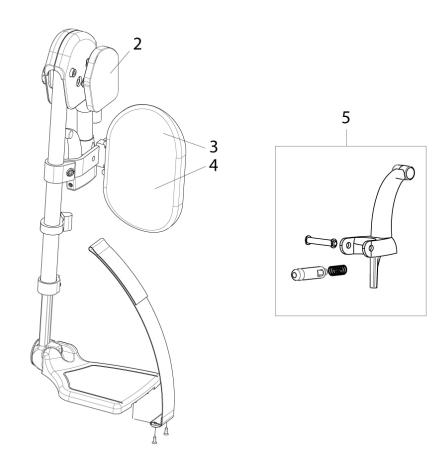

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
2	064250-001	Kniepolster	rechts
	064250-002	Kniepolster	links
3 - 4	064924	Wadenauflage mit Überzug	
4	064927	Überzug für Wadenpolster	
		3	

Seite 18 / 71 02.06.2020

Fußrastenhalter 70°, ab 05.02.2013 (Serien-Nr. TAN13027481)

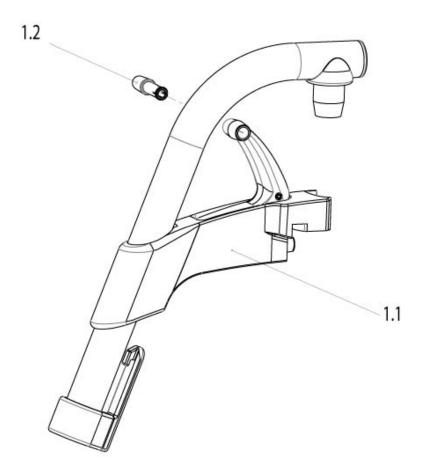

ET06402007

Ersatzteile

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1.2	06402207-ET	Griff	2 Stk./Pkg.
1	064804-063	Fußrastenhalter 70° (ohne Fußbrett) kpl schwarz	links/rechts verwendbar

Seite 19 / 71 02.06.2020



Fußraste, 70°, mit Fußbrett, Aluminium

Ersatzteile

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	06402207-ET	Griff	2 Stk./Pkg.
5	742021M	Fersenband SB 410-430mm	
4	820464M	Fußbrett Aluminium, winkelverstellbar SB410-430mm	rechts
4	820466M	Fußbrett Aluminium, winkelverstellbar, SB410-430mm	links

Seite 20 / 71 02.06.2020



Fußraste hochschwenkbar, UNI Style

Ersatzteile

Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
20124BLK	Fußraste Manual ELR Uni Style, schwarz	Links

Seite 21 / 71 02.06.2020



Fußbrett für Fußraste hochschwenkbar, UNI Style

Ersatzteile

Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
25371	Winkeleinstellbare Fußplatte	Rechts
25372	Winkeleinstellbare Fußplatte	Links

Seite 22 / 71 02.06.2020



Kabelbäume

Ersatzteile


Bezeichnung

Batterie Kabel

Kabel Verstellmotor

Seite 23 / 71 02.06.2020




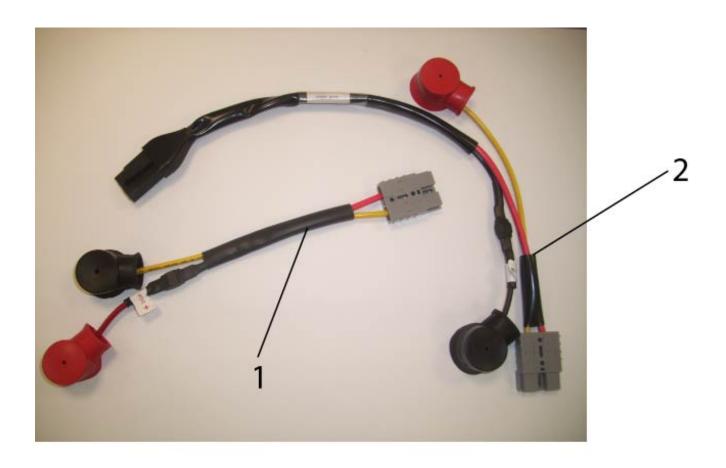

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
2	034200	Kabelbaum Batterie hinten, mit Polkappen
1	034201	Kabelbaum Batterie vorne, mit Polkappen

Seite 24 / 71 02.06.2020



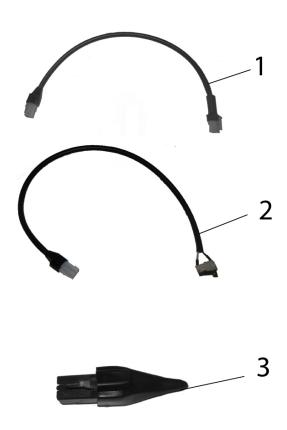

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
2	034143	Aktuator Kabel (für Sitzneigungsverstellung)
1	034144	Aktuator Kabel (für Rückenwinkel, -Sitzneigungsverstellung und ELR)
3	060665	Sperr-Ringleitung

Seite 25 / 71 02.06.2020



Licht / Blinker


Ersatzteile

Bezeichnung

Licht / Blinker

Seite 26 / 71 02.06.2020



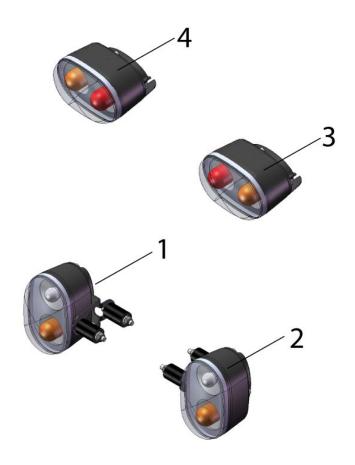

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	034131	Licht STVZO vorne rechts	
2	034132	Licht STVZO vorne links	
3	034133	Licht STVZO hinten rechts	
4	034134	Licht STVZO hinten links	
	034139	Glühbirne 12V, 5W (für Lichter und Blinker)	8 Stück pro Stuhl
	034142	Kabel Lichter	2 St. je Stuhl
	172001.32105	VR2 Lichtmodul	

Seite 27 / 71 02.06.2020



Motor


Ersatzteile

Bezeichnung

Motor

Seite 28 / 71 02.06.2020



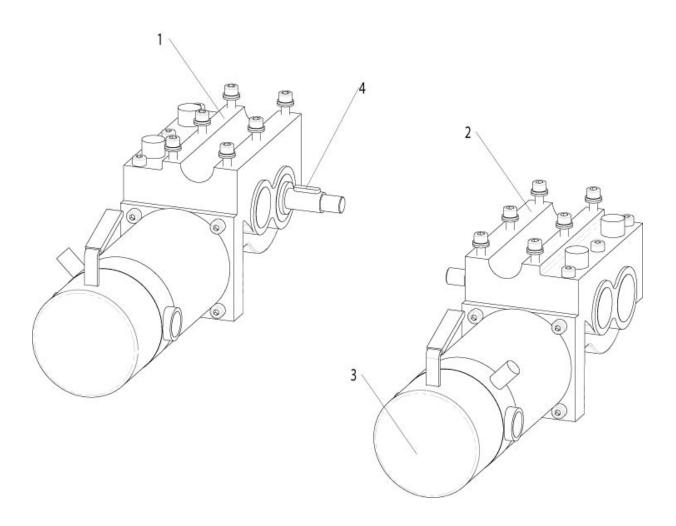

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
2	034005	Motor 6km/h	rechts
1	034006	Motor 6km/h	links
	034007-001	Bremse	Mittelradantrie b = links, Heckantrieb = rechts
	034007-002	Bremse	Mittelradantrie b = rechts, Heckantrieb = links
3	034008	Abdeckung Bremse	4 St./Pkg.
	034190	Motorbürste	4 St./Pkg.
	112281	Kohlebürsten-Kit für 4-Pol-Motoren inkl. Kappen	für einen Motor
	112283	Bremsenabdeckung inkl. Befestigungselemente	

Seite 29 / 71 02.06.2020



Motor

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	112770	Bremse kpl.	Mittelradantrie b = rechts, Heckantrieb = links
	112771	Bremse kpl.	Mittelradantrie b = links, Heckantrieb = rechts
4	P04551	Passfeder	

Seite 30 / 71 02.06.2020



Produktaufkleber


Ersatzteile

Bezeichnung

Produktaufkleber

Seite 31 / 71 02.06.2020



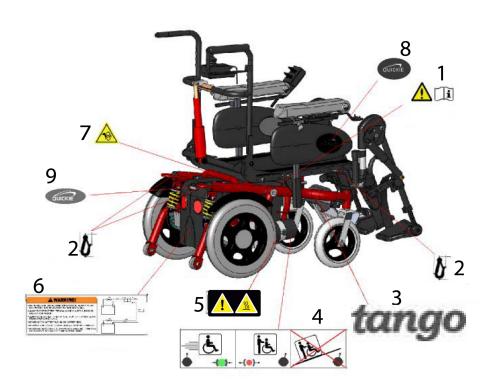

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
2	000412.6307-ET	Aufkleber - Befestigungspunkt -, weiß	4 St./Pkg.
5	014599	Aufkleber - heiße Oberfläche Motor -	
7	014603	Aufkleber - Quetschgefahr -	
3	034196	Produktaufkleber -Tango-	
4	034197-001	Aufkleber - Warnung Freilauf-	rechts
	034197-002	Aufkleber - Warnung Freilauf-	links
6	034198	Aufkleber - Warnung Batterie-	
1	060589	Aufkleber Hinweis: siehe Bedienungsanleitung	
9	061542	Aufkleber -Quickie-	
8	P19077	Aufkleber -Quickie- für Seitenteil	rechts
	P19078	Aufkleber -Quickie- für Seitenteil	links

Seite 32 / 71 02.06.2020



Rahmen

Ersatzteile

Bezeichnung
Abdeckungen
Batterietisch
Federung
Motor Anbindung und Sicherheitsrad
Rahmen

Seite 33 / 71 02.06.2020






Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
2	034036	Befestigung Batterieabdeckung	
1-3	034047	Batterieabdeckung kpl.	
4	060515	Radabdeckung kpl. mit Befestigungsteilen	Paar

Seite 34 / 71 02.06.2020




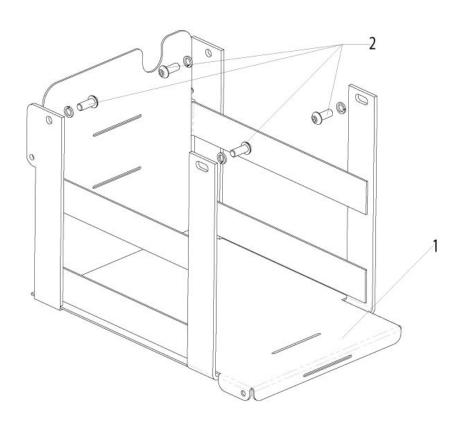

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	034034	Schaumstoffpolsterung	2 St. pro Stuhl
2	034037	Befestigungen Batterietisch	
1-2	034039	Batterietisch mit Haltegurten	
	034149	Haltegurte für Batterie	

Seite 35 / 71 02.06.2020




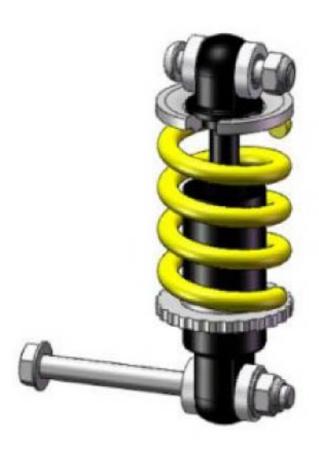

Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
034020	Federungseinheit mit Befestigungen	2 St. pro Stuhl

Seite 36 / 71 02.06.2020




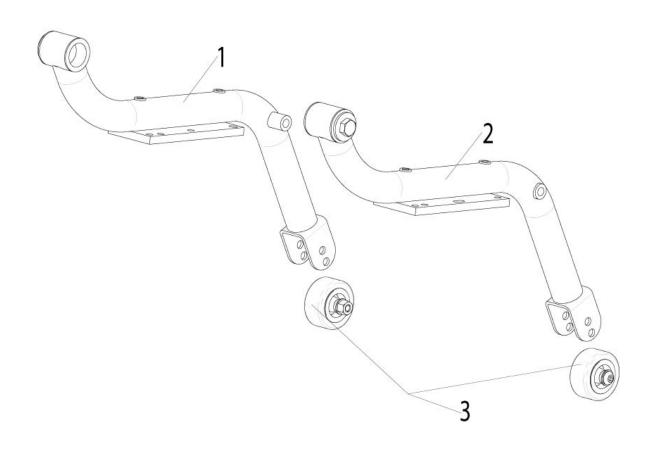

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	000282128	Lager für Motor Anbindung	2 St. pro Anbindung
1	034023-001	Motor Anbindung SILBER	rechts
1	034023-002	Motor Anbindung BLAU	rechts
1	034023-003	Motor Anbindung ROT	rechts
2	034024-001	Motor Anbindung SILBER	links
2	034024-002	Motor Anbindung BLAU	links
2	034024-003	Motor Anbindung ROT	links
3	060556	Sicherheitsrad 2 Zoll + Befestigungsteile	Paar

Seite 37 / 71 02.06.2020



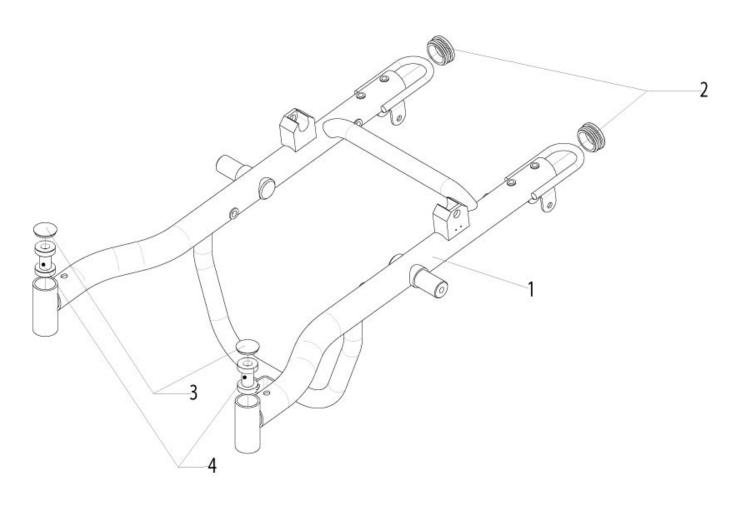

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
2	000282130	Abdeckkappe für Rahmenrohr	2 St. pro Rollstuhl
1-2	034009-001	Rahmen silber	
1-2	034009-002	Rahmen blau	
1-2	034009-003	Rahmen rot	
4	034021	Lager für Lenkrad	2 St./Pkg., Hinweis: für Rollstühle gebaut bis 13.10.2014.
4	C04232	Lager für Lenkrad	Paar, Hinweis: für Rollstühle gebaut ab 14.10.2014.
3	P01355	Abdeckkappe für Lenkradgehäuse	2 St. pro Rollstuhl

Seite 38 / 71 02.06.2020



Rahmen

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	P01692	Anti-Flatter Scheibe - oval -	Hinweis: für Rollstühle gebaut ab 14.10.2014
7	P04013	Mutter M6 DIN 985	
6	P04589	Befestigung Rückenbespannung	

Seite 39 / 71 02.06.2020



Sitz / Rücken

Ersatzteile

Bezeichnung
Armlehnenhalterung einstellbar
Beckengurt
Komfort Rücken
Rücken/Rückenverstellung
Rückenbespannung Standard
Seitenteil
Sitzhöhen Kit
Sitzkissen
Sitzneigung, elektrisch
Sitzneigung, fest
Sitzneigung, manuell
Sitzrahmen
Schwerpunkteinstellung
Rückenversteifung
Seitenteilaufnahme
Seitenteil, klein
Seitenpolster, Sitzbreitenreduktion
Rückenverstärkung

Seite 40 / 71 02.06.2020

Beckengurt



Ersatzteile

Artikelnr.	Bezeichnung
034195	Schrauben für Befestigung Beckengurt
P08232	Beckengurt

Seite 41 / 71 02.06.2020






Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
	034157-001	Jay Comfort Rücken, inkl. Montagematerial, kpl.	SB 400 mm
	034157-002	Jay Comfort Rücken, inkl. Montagematerial, kpl.	SB 440 mm
	034157-003	Jay Comfort Rücken, inkl. Montagematerial, kpl.	SB 480 mm
1	909.022	JAY Comfort Rücken, Montagematerial	

Seite 42 / 71 02.06.2020



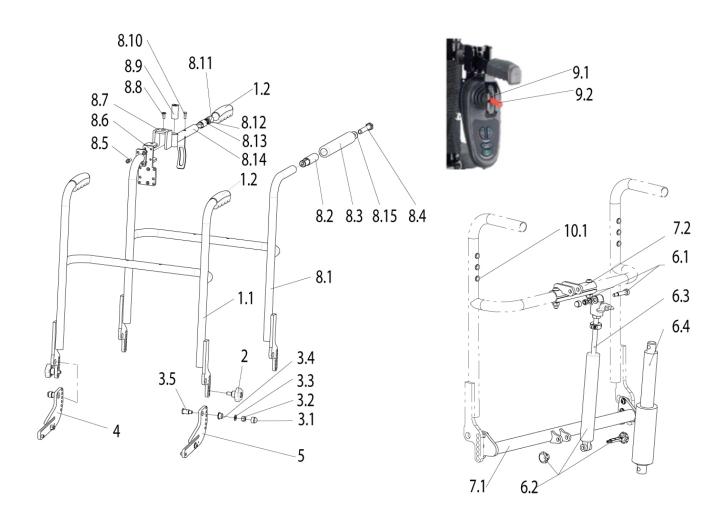

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
3.4	000282129	Lager Drehachse	2 St. pro Stuhl
8.3	000934.2005-ET	Moosgummi Handgriffe	10 St./Pkg.
1.1-1.2	034064	Rückenrahmen kpl.	
4	034069-001	Befestigungsplatte für Rücken	rechts
5	034069-002	Befestigungsplatte für Rücken	links
3.1-3.5	034074	Drehachse Rücken kpl.	Paar
2	034088	Sternschraube (für fixierten Rückenwinkel)	2 St. pro Stuhl
6.1-6.2, 6.4	034093	Aktuator für elektrische Rückenwinkelverstellung kpl.	
6.1-6.3	034094	Gasfeder für manuelle Rückenwinkelverstellung kpl.	
6.1-6.2, 6.4, 7.1-7.2	034193	Upgrade elektrische Rückenwinkelverstellung	

Seite 43 / 71 02.06.2020




Rücken/Rückenverstellung

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
6.1-6.3, 7.1-7.2	034194	Upgrade manuelle Rückenwinkelverstellung	
9.1	20150	Joystick für Begleitsteuerung	
9.2	77.20.002	Feder für Controller	
6.1 - 6.2	C04104	Befestigung Aktuator	
1.2	P01024	Handgriffe	2 St. pro Stuhl

Seite 44 / 71 02.06.2020




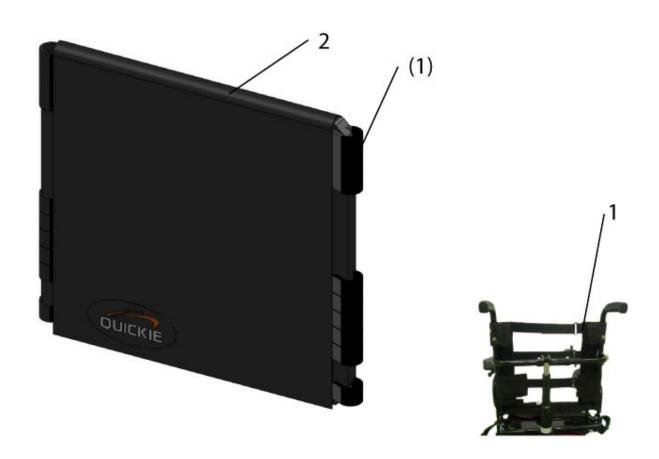

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
1-2	034150	Rückenbespannung kpl.
2	034152	Überwurf
1	064941-001	Rückengurte anpassbar (4 Gurte) SB 380 - 455 mm
	P04589	Befestigung Rückenbespannung

Seite 45 / 71 02.06.2020




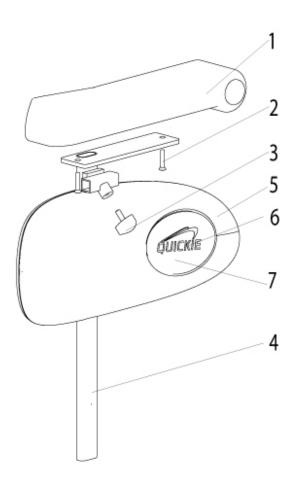

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	C02441	Armpolster	1 St./Pkg.
5	C04216	Kunststoffblende-Seitenteil	links/rechts verwendbar
4	C07546NB	Seitenteilaufnahme	rechts
4	C07547NB	Seitenteilaufnahme	links
1 - 4	C07550	Seitenteil kpl.	rechts
1 - 4	C07551	Seitenteil kpl.	links
3	P01282	Flügelschraube	2 St. pro Stuhl
2	P04294	Schraube DIN 956 M5X25	4 St. pro Stuhl
6	P19077	Aufkleber -Quickie- für Seitenteil	rechts
7	P19078	Aufkleber -Quickie- für Seitenteil	links

Seite 46 / 71 02.06.2020




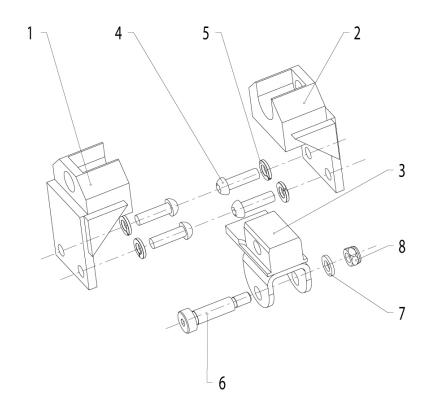

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1-8	034205	Sitzhöhenkit kpl.	
1	034207-001NB	Adaptor Sitzhöhenkit	rechts
2	034207-002NB	Adapter Sitzhöhenkit	links
3	034211	Verlängerung für Sitzneigung	
6	P03219	Schulterschraube 8MMX25MM	
7	P04003	Scheibe DIN 125 M6	
8	P04013	Mutter M6 DIN 985	
5	P04041	Unterlegschraube DIN 127 M6	
4	P04555	Schraube ISO 7380 M6X15	

Seite 47 / 71 02.06.2020




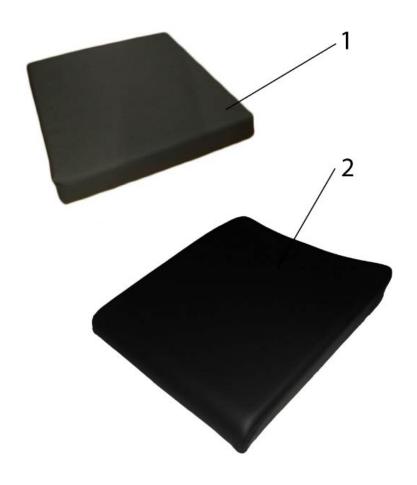


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
1	034155	Sitzkissen
2	034156	Jay Comfort Sitzkissen

Seite 48 / 71 02.06.2020



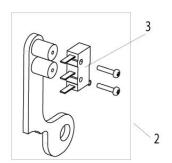


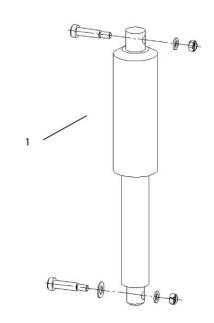

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
2-3	034063	Schalterbaugruppe Sitzneigungsverstellung
1	034104	Verstellmotor Sitzneigung kpl.
4	034143	Aktuator Kabel (für Sitzneigungsverstellung)

Seite 49 / 71 02.06.2020




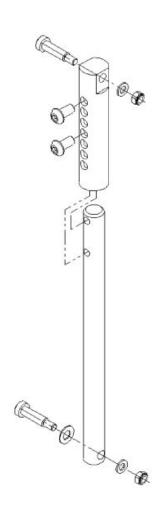

Artikelnr.	Bezeichnung
034089	Sitzneigungsverstellung fixiert

Seite 50 / 71 02.06.2020




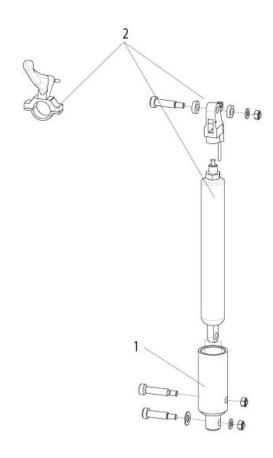

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
2	034033	Gasfeder inkl. Zwischenstück, Bowdenzug und Auslösehebel
1-2	034105	Gasfeder kpl.

Seite 51 / 71 02.06.2020




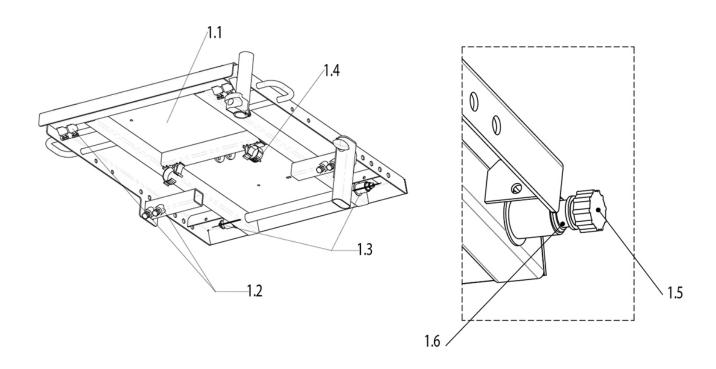


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1.3	000282127	Lager Sitzrahmen	2 St. pro Stuhl
1.1-1.4	034049	Sitzplatte kpl.	
2.1-2.3	034079	Seitenteil Aufnahme	Paar
	034084	Aufhängung Fußraste	2 St./Pkg.
1.4	034174	Einstellbarer Clip	2 St. pro Stuhl
1.2	034192	Befestigung Aufnahmen (Fußraste & Seitenteil)	

Seite 52 / 71 02.06.2020

Seitenteilaufnahme

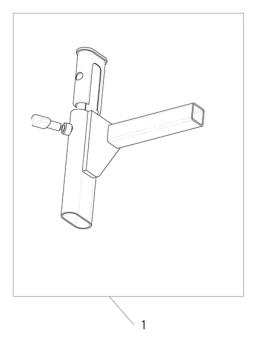

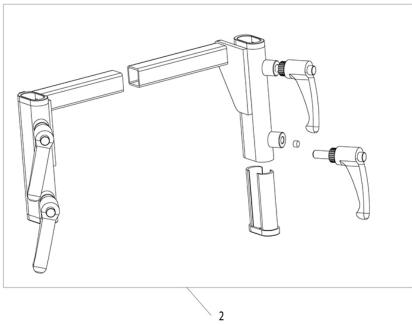


Ersatzteile

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	034079	Seitenteil Aufnahme	Paar

Seite 53 / 71 02.06.2020




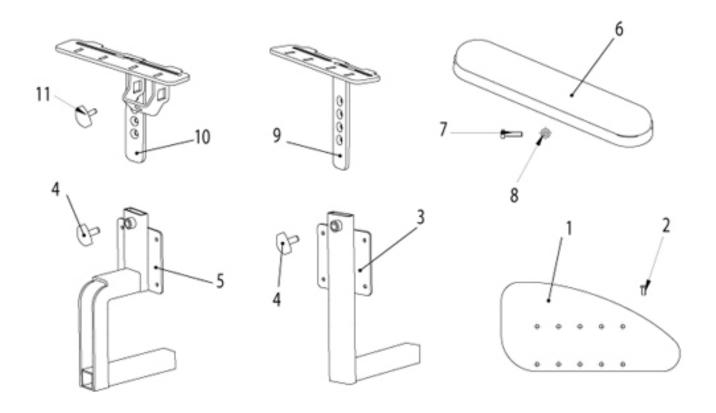

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
	014656	Polster Kleiderschutz klein
	014657	Polster Kleiderschutz klein
6	561024	Armpolster kurz 250 mm

Seite 54 / 71 02.06.2020



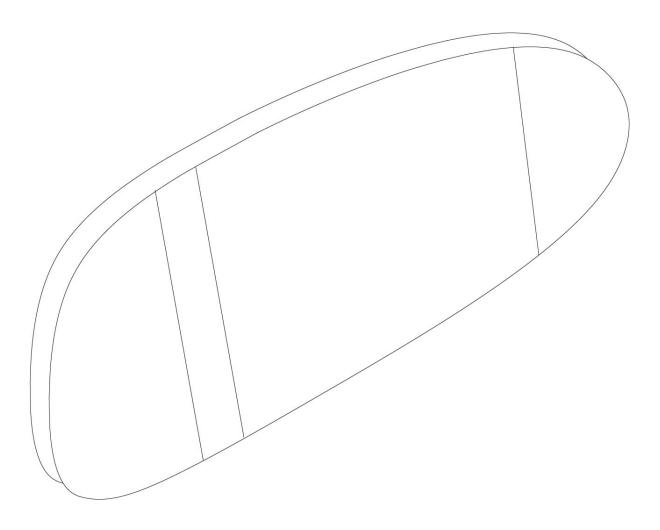

Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
P08235	Seitenpolster Sitzbreitenreduktion	rechts
P08236	Seitenpolster Sitzbreitenreduktion	links

Seite 55 / 71 02.06.2020




Steuerung

Ersatzteile

Bezeichnung Halter Ansteuerungsbox 4 Verstellmotoren Halter Dualsteuerung Halter parallel abschwenkbar Steuerung Halter, höhenverstellbar

Seite 56 / 71 02.06.2020

Halter Ansteuerungsbox 4 Verstellmotoren

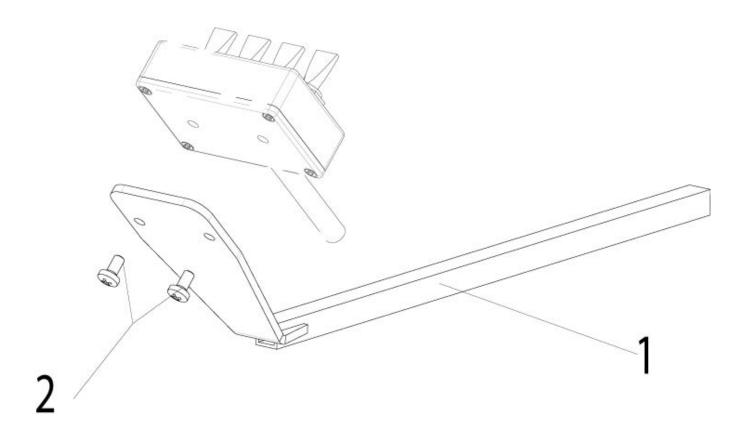


Ersatzteile

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
2	034119	Befestigungsschrauben
1-2	034120	Halter Ansteuerungsbox 4 Verstellmotoren

Seite 57 / 71 02.06.2020



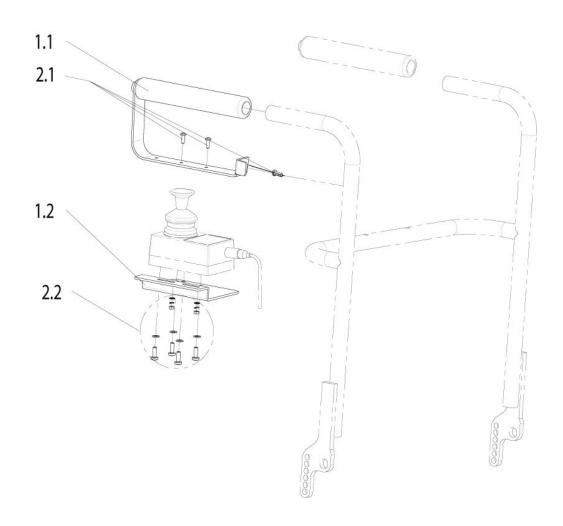


Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
1.1-2.2	034170	Halter Begleitsteuerung kpl.
2.1-2.2	034173	Befestigung Halter

Seite 58 / 71 02.06.2020



Halter parallel abschwenkbar

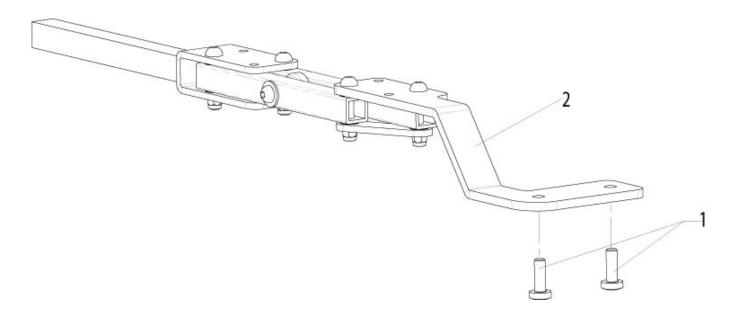


Ersatzteile

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
1	034118	Befestigung Halter	
1-2	C01877	Halter parallel abschwenkbar für VR2 & VSI Steuerung	rechts
	C01878	Halter parallel abschwenkbar für VR2 & VSI Steuerung	links

Seite 59 / 71 02.06.2020



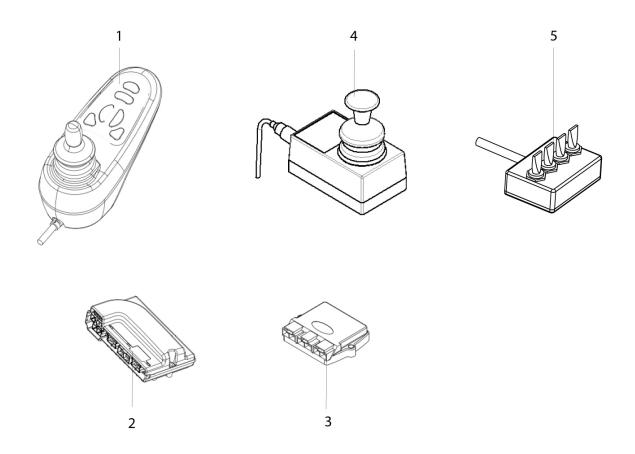

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
	015886	VR2 DTT Programmierkabel
5	034189	Ansteuerungsbox 4 Verstellmotoren
2	108219	R-Net Steuerung EL PM90
3	172001.32105	VR2 Lichtmodul
1	172001.32111	VR2 Bedienpult 2 Aktuatoren Steuerung ohne Licht und Blinker
2	172001.32113	VR2 Elektronik PM60-A2 Motor 6 km/h
1	172001.32115	VR2 Bedienpult 2 Verstellmotoren Steuerung mit Licht und Blinker
1	C01910	VR2 Joystick Modul (nur Fahren)
4	C01913	Begleitsteuerung
	C01914	Begleitsteuerung Y-Kabel
	C01919	Handprogrammiergerät VR2
	C01920	PC Software VR2

Seite 60 / 71 02.06.2020



Steuerung

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
2	C04066	VR2 PM50 mit Programm (kein Verstellmotor-Ausgang)
2	C04067	VR2 PM60 mit Programm (zwei Verstellmotoren-Ausgänge)

Seite 61 / 71 02.06.2020




Zubehör

Ersatzteile

Bürgersteighilfe Komfort Kopfstütze Rückspiegel Standard Kopfstütze Stockhalter Therapietisch Seitenpelotte, abschwenkbar Sicherheitsrad, abschwenkbar	Bezeichnung	
Komfort Kopfstütze Rückspiegel Standard Kopfstütze Stockhalter Therapietisch Seitenpelotte, abschwenkbar	Batterien und Ladegerät	
Rückspiegel Standard Kopfstütze Stockhalter Therapietisch Seitenpelotte, abschwenkbar	Bürgersteighilfe	
Standard Kopfstütze Stockhalter Therapietisch Seitenpelotte, abschwenkbar	Komfort Kopfstütze	
Stockhalter Therapietisch Seitenpelotte, abschwenkbar	Rückspiegel	
Therapietisch Seitenpelotte, abschwenkbar	Standard Kopfstütze	
Seitenpelotte, abschwenkbar	Stockhalter	
	Therapietisch	
Sicherheitsrad, abschwenkbar	Seitenpelotte, abschwenkbar	
	Sicherheitsrad, abschwenkbar	

Seite 62 / 71 02.06.2020



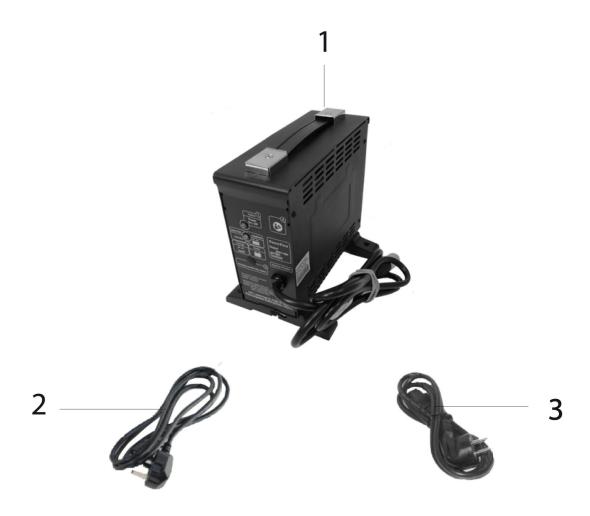

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
3	060500	EU Netzkabel mit 2 PIN Stecker	
2	060501	UK Netzkabel mit 3 PIN Stecker	
1+3	060794	8 A Ladegerät mit EU 2 PIN Netzkabel	Hinweis: Ladegerät bei SALSA Rollstühlen nur in UK in Verwendung.
1-2	060795	8 A Ladegerät mit UK 3 PIN Netzkabel	Hinweis: Ladegerät bei SALSA Rollstühlen nur in UK in Verwendung.
	21116001	Batterie 55 Ah	SALSA/SALSA M und ZIPPIE SALSA / ZIPPIE

Seite 63 / 71 02.06.2020




Batterien und Ladegerät

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Kommentar
			SALSA M: Nachrüstung nur mit Batteriekabel # 060107
	G40A	Gel-Batterie 40 Ah	

Seite 64 / 71 02.06.2020



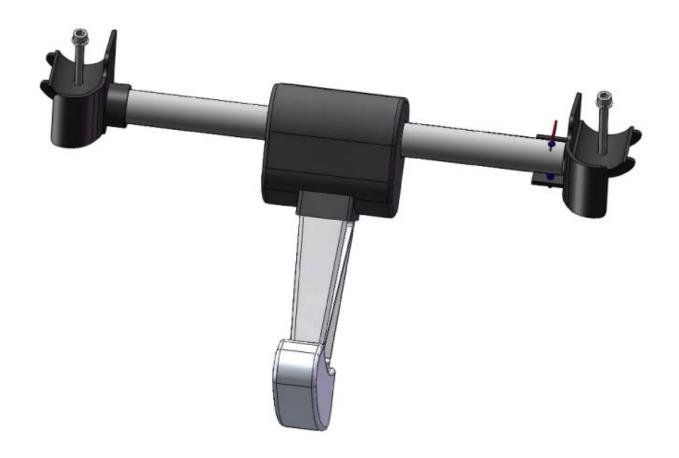

Artikelnr.	Bezeichnung
034110	Bürgersteighilfe kpl.

Seite 65 / 71 02.06.2020






Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
1	P01604	Flügelschraube
2	P01606	Handgriff

Seite 66 / 71 02.06.2020




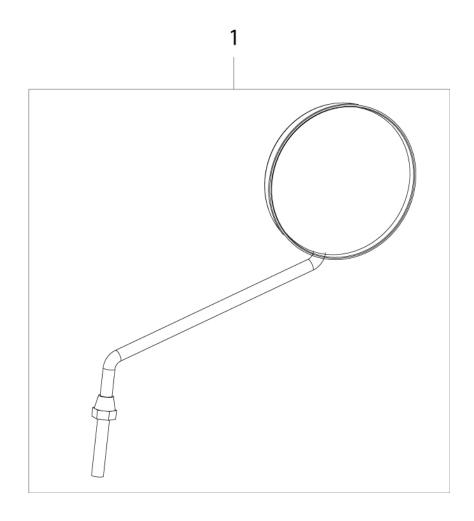

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
1	000232008	Rückspiegel

Seite 67 / 71 02.06.2020




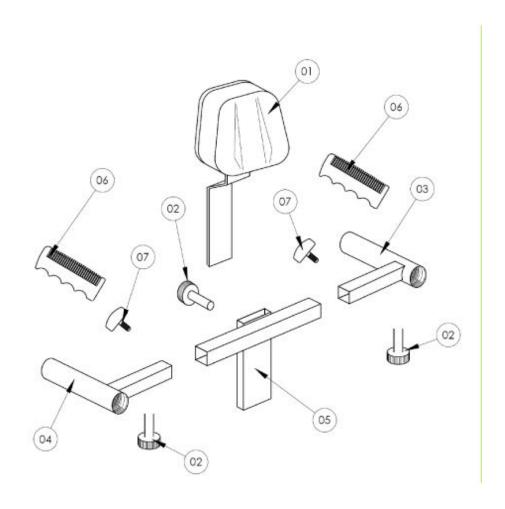

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
3	C01804N	Anbau Schiebegriffe - links
4	C01805N	Anbau Schiebegriffe - rechts
5	C01843N	Verbindungsstück
1	C02052	Polster
1-7	C02072	Standard Kopfstütze kpl.
2	P01254	Handrad
7	P01604	Flügelschraube
6	P01606	Handgriff

Seite 68 / 71 02.06.2020




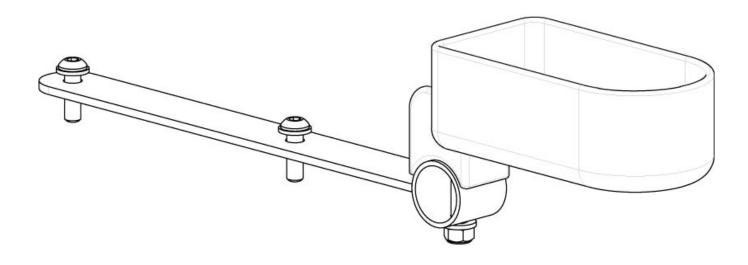

Artikelnr.	Bezeichnung
034125	Stockhalter

Seite 69 / 71 02.06.2020



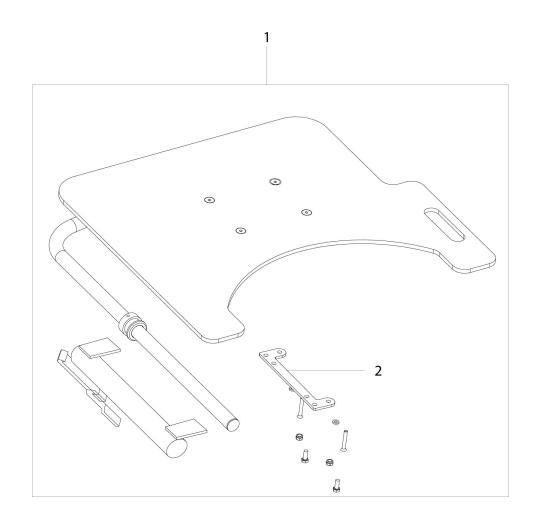

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung
1 - 2	C01900	Therapietisch kpl.
2	P02334NB	Anschraubplatte

Seite 70 / 71 02.06.2020

